

COLETA E ENVIO DA AMOSTRA – TESTE IGRA-TB

PÚBLICO ALVO



HIV CD4 > 350 células/mm³
Crianças > 5 anos contatos de TB
Candidatos a transplantes sólidos

OBS 1: PACIENTE NÃO PODE ESTAR COM SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE TUBERCULOSE.

CONDIÇÕES
PRÉ COLETA



Jejum de 04 horas
Sangue arterial ou venoso

COLETA



Tubo heparina sódica

OBS 2: Coletar no MÍNIMO 5 mL de sangue e COLOCAR IMEDIATAMENTE NO TUBO COM HEPARINA SÓDICA.

ENVIO DA
AMOSTRA



Enviar ao IAL em até 16 horas após a coleta, juntamente com a ficha de envio da amostra e a papeleta de cadastro no GAL.

OBS 3: O PRAZO MÁXIMO DE ENVIO AO LABORATÓRIO, APÓS A COLETA, É DE 16 HORAS.

Dias e horário de envio ao IAL Bauru: segunda a quinta-feira até as 11:00 horas.